

床ずれ防止関連



床ずれは、寝たきりの方や寝返りのできない方にとっては、とてもつらいことです。介護する方の予防ケアの知識や手当はもちろん、症状に合ったケア用品を選ぶことが大切です。


床ずれの原因は？

- 摩擦**
シーツのよじれ
- 圧迫**
同じ姿勢のまま寝る
- 湿潤**
汗・失禁
- 寝具との隙き間のずれ
- 皮膚や衣類等の汚れ
- 栄養バランスの偏り

床ずれの多くは、皮膚が圧迫され、その部分の皮膚組織に十分な血液がゆきわたらなくなり、発赤やびらん、壊死が起こる状態のことです。

床ずれのしやすいところ

骨が突き出ている部分にできやすく、体重のかかりやすい腰部分が一番できやすいところです。

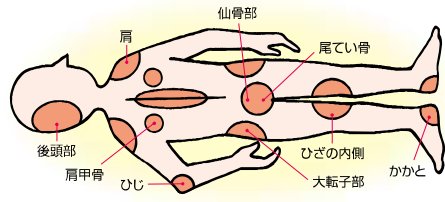

床ずれの予防法

体位を交換し、同じ部位に圧迫をかけない

1〜2時間に1回は仰向け、右向き、左向きと体位変換をします。床ずれ防止ふとん・パッド、エアーマットなど防止用具も利用してください。

体位交換方法(寝返りの方法)

仰向け⇒横向き

介護者は向けようとする側に立って、介護される人の手をあげます。反対側の手は胸の上のせ、向けようとする側の反対のヒザを立てます。



肩と腰に手を当てて、手前に寝返りさせます。



クッションなどを当てて安定させ、ラクな姿勢をとってもらいます。



横向き⇒仰向け

当てているクッションなどをはずし、肩と腰に手を当てて、向こう側へゆっくり仰向けにします。



横向き⇒仰向け(移動マット使用)

移動マットの両側を手前に引っ張ります。肩と腰に手を当てて、向こう側へゆっくりと仰向けにします。




体位変換のほかこんなことにも気をつけましょう。

- 栄養・食事の管理
- 水分を十分に取る
- 通気をよくしムレを防ぐ
- 入浴や清拭で清潔にする
- 寝具やオムツ等のムレ・汚れ・シワに注意
- 床ずれ防止用具をうまく活用する

予防には、発生原因を除去することが大切です。床ずれができる前に十分なケアを心がけましょう。

床ずれの手当て

床ずれができたら早期治療が重要です。床ずれは、①痛みを感じる→②赤くなる→③水泡ができる→④皮膚がむける→⑤出血したり潰瘍ができたりする→⑥骨が見えるようになる、の順で進行します。赤くなりかけたときは、熱めの湯でタオルを絞り、こすらないように押さえるようにしてふき、パウダーをふって乾燥させ、手のひらで滑らかにマッサージをします。血行をよくすることがいちばん大切だからです。その部分は直接布団などに当たらないように、円座などを当てます。水泡ができてしまった場合は、かかりつけの医師や看護師に相談して、手当の方法を確認してください。


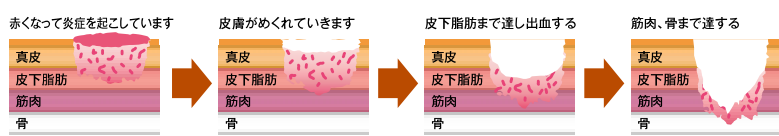


ただれてしまった時は

消毒済みの清潔なガーゼを当てて、医師や看護師などに相談してください。できるだけその部分が圧迫されないように、体位を変えたり、円座などを使ってください。

皮膚が赤くなっていたら

蒸しタオルで清拭し、乾いたタオルでよく拭きましょう。マッサージやドライヤーによる乾燥は皮下組織の炎症や損傷を悪化させる可能性があるため勧められない処置です。

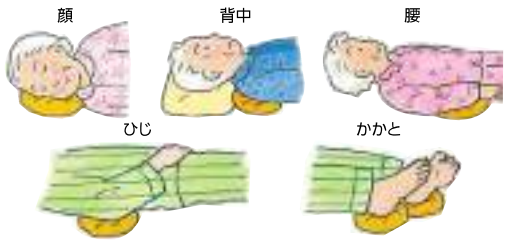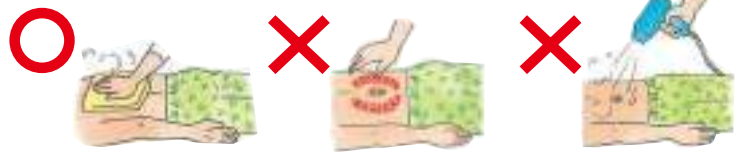

床ずれ防止用具シープスキン



医療・看護用シープスキン 第三者機関による認証
ナーシングラッグはウールの国際規格であるウールマークの中でも
医療・看護用シープスキンとしてライセンスを取得しています。

ライセンスNO.3269JA92W



1cmあたり
5,000本以上の毛



オーストラリア

メルボルン

ナーシングラッグに使われているシープスキン

高品質なオーストラリアンメリノ種でおかつ、メルボルン産のアンションラムのみを使用しています。

アンションラムとは

生育期間のほとんどが冬でおかつ、生後3ヶ月から5ヶ月で一度も毛刈りが行われていない子羊です。1年間で1~2.5ヶ月間しか入手期間がありません。紫外線による毛の表面にあるキューティクルの痛みや汚れが少なく、羊毛皮本来の撥水性、吸湿性が高く備わっています。また、高密度で弾力性にも優れた体圧を分散します。



日本品質


製品の加工は日本で行っております。縫製時に段ができないように革の厚みをみて微調整するなど職人が1枚1枚製作しております。

呼吸するように空気を循環

羊毛繊維の多層構造

ウール繊維の構造は複雑で、いくつもの層に分かれ、内部に湿気を吸収します。その吸収量は木綿の約2倍、ポリエステル約40倍もあります。また内部の湿気を放出し、表面の湿度を50~55%に保っています。就寝時の快適な湿度は55%といわれていますが、ナーシングラッグはいつもサラッとしていて、ムレを防ぎます。


空気を循環する仕組み

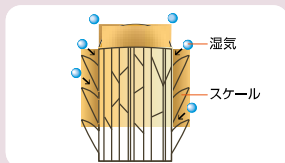

開いたスケールから空気中にある湿気(蒸気)を羊毛繊維が吸収します。



湿気を吸収するとスケールが閉じ繊維内部に蓄えます。

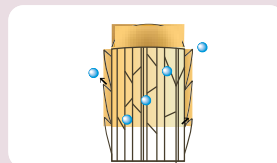


吸収した湿気を徐々に拡散し、寝床内の湿度を50~55%に保ちます。



- 抗菌加工
- 防ダニ加工
- ノンホルマリン加工

優れた除湿機能!

湿度の比較
(補装具としてナーシングラッグを内側に使用した場合)

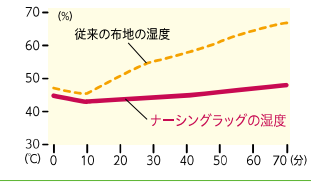

076A-01 ナーシングラッグマットレス

1302-0150

NRM-01 330,000円(税抜300,000円)

- 医療看護用羊毛皮が寝返りを妨げずに床ずれを防止。
- 重量/12.6kg ●材質/(表面)シープスキン(天然羊毛皮)、(中材)上層=無膜ウレタン、中層=ポリプロピレン立体構造体、下層=ポリエステル固綿

表面の天然羊毛皮は体圧分散性、摩擦の軽減、吸湿性、通気性に優れています。3層構造の中材は体圧の分散と通気性に優れ沈み込みすぎることなく身体を支持します。



3層構造の中材

- 1層 無膜ウレタン
通気性、透水性、高弾性に優れたウレタンフォーム
厚み: 40mm
- 2層 カルファイバー®
ファイバーを3次元に絡ませた立体網状構造体で、高弾性、通気性、透水性も優れた新素材
厚み: 20mm
- 3層 ポリエステル固綿
耐久性を持つ波状の構造で、身体全体を支持
厚み: 40mm

高品質の羊毛皮と3層構造のマットを一体化した
ナーシングラッグマットレスは、体動を妨げずに床ずれを防止します。

体圧分散性と寝返りの際の筋活動(筋力)を測定

体圧分散の測定 仰臥位で全身の体重の圧迫部分を測定
一般のマットレスに比べ、ナーシングラッグマットレスと床ずれ防止用静止型マットレスは共に体圧の分散性は高く圧迫を防いでいます。

筋電位の計測 右ひざを立てて腰部分から上体を回旋し、左側臥位をとった時の右大腿筋の筋電を計測

床ずれ防止用静止型マットレスでは、右ひざを立てたあとと身体が沈み込みその後筋力が働いて側臥位をとっている。筋電の振幅も大きく寝返りにくい。それに比べ、ナーシングラッグマットレスと一般のマットレスは、少しの筋活動でスムーズに寝返りが出来ている。

体圧分布図	筋電位計測図(寝返り時の右大腿筋を計測) 筋活動の大きささと所要時間を計測波形が大きいほど筋活動が大きい
ナーシングラッグマットレス 体圧分散性: 高 	波形の振幅が連続的に緩やか 筋活動を行うと同時に体動が始まりスムーズな動きが出来ている。
床ずれ防止用静止型マットレス 体圧分散性: 高 	波形の振幅が後半、急激に大きい 前半では筋力が吸収され、底付きした後、筋活動が大きく働いている。
一般のマットレス(特研墨台付属品) 体圧分散性: 低 	波形の振幅が前半小さく、その後、緩やか 筋活動を行うと同時に体動が始まりスムーズな動きが出来ている。

(当社比較)

ナーシングラッグ

077A-01 NRベッドシート **1302-0130**

①90×190cmタイプ(全身用) **264,000円**(税抜240,000円)
 ②65×130cmタイプ(半身用ロング) **129,800円**(税抜118,000円)
 ③65×90cmタイプ(半身用) **90,200円**(税抜82,000円)

●優れた吸湿性、通気性、弾力性で局部を保護する全身用羊毛シート。
 ●夏ムシにくく、冬暖かで一年中使えます。
 ●サイズ/①約90×190cm②約65×130cm③約65×90cm ●重量/①約5kg②約2.5kg③約1.7kg ●材質/(表面)シープスキン(裏面)ポリエステル、ひも止め付(①のみ)



077A-03 ナーシングラッグ専用ブラシ **1302-0140**

2,200円(税抜2,000円)

●サイズ/約幅10×長さ14.5cm ●重量/約65g


TAIS/①(全身用)00076-000005

ウイズ

077A-02 ナーシングラッグ **1302-0500**

①二匹物 **85,800円**(税抜78,000円)
 ②一匹半物 **59,400円**(税抜54,000円)
 ③一匹物 **42,900円**(税抜39,000円)

●ベッドやふとんに肩からお尻が当たるように敷くと、体圧を分散して摩擦を軽減します。
 ●サイズ/①約65×180cm②約65×130cm③約65×95cm ●重量/①約3kg②約2.2kg③約1.5kg ●材質/シープスキン

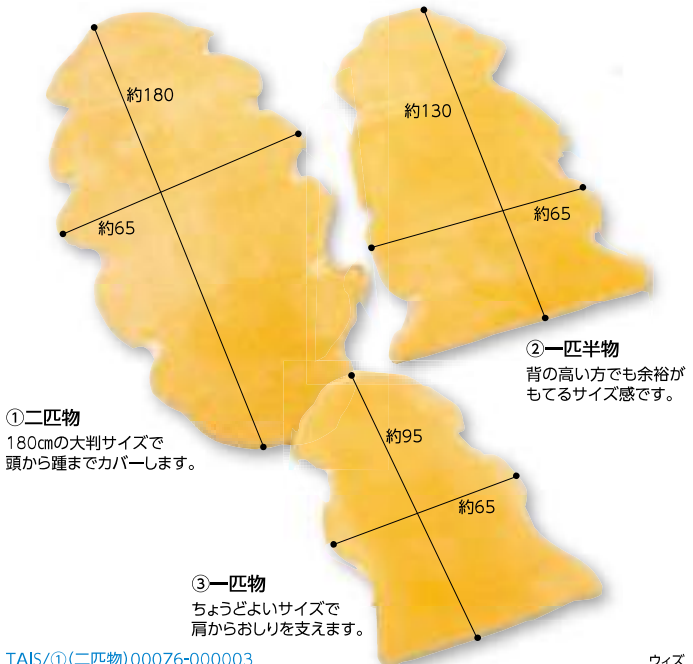

TAIS/①(二匹物)00076-000003

ウイズ

使用場所によって使い分ける円座

毛面が円座の穴に落ち込む際のズレ力を解消しますので、穴の開いた円座でいわれるズレ力がかからず、また穴周囲の圧力も毛面で分散しているので快適にお使いいただけます。

- 円座厚型**
主に座る際のクッションや、ポジショニング時のクッションとして。
- 円座薄型**
2つ折りにしても使えます。薄くて違和感がありません。
- ドーナツパット**
一番小さなクッション、局所的な湿潤緩和などに。
- 円座薄型穴無**
裏面にマジックテープがついており2つ折りにして足に挟んだり、各種ポジショニングに。そのまま体の下に敷いて圧分散にも。
- ムーンパットS/M**
円座薄型穴無と同様に使えます。より小さな面積への除圧、湿潤緩和に。

077A-04 円座 NR-10 **1302-0100**

15,950円(税抜14,500円)

●座る際や体位変換時のクッションとして使用できます。
 ●サイズ/直径約36×厚み8.5×中穴径11cm ●重量/約400g ●材質/(表面)シープスキン(中材)ポリエステル繊維100%(裏面)ポリエステルレーヨン布地

ウイズ

077A-05 円座薄型 NR-11 **1302-0101**

15,950円(税抜14,500円)

●薄型タイプで背中に敷いても身体が湾曲することなく床ずれを防止します。
 ●サイズ/直径約36×厚み4.5×中穴径11cm ●重量/約230g ●材質/(表面)シープスキン(中材)ウレタン(裏面)ポリエステルレーヨン布地

ウイズ

077A-06 ドーナツパット NR-09 **1302-0300**

4,400円(税抜4,000円)

●かかとやひじ、耳の後ろ等床ずれのできやすい箇所の湿潤緩和に。
 ●サイズ/直径約16×厚み4.5×中穴径4.5cm ●重量/約80g ●材質/(表面)シープスキン(中材)ウール綿(裏面)ポリエステルレーヨン布地

ウイズ

077A-07 円座薄型穴無 NR-24 **1302-0104**

15,950円(税抜14,500円)

●裏面マジックテープ付で2つ折りにして脇や足の間に挟んで使用することもできます。
 ●サイズ/直径約36×厚み4.5cm ●重量/約290g ●材質/(表面)シープスキン(中材)ウレタン(裏面)ナイロン布地マジックテープ付

ウイズ

077A-08 ムーンパット **1302-0103**

①Mサイズ(NR-18) **11,000円**(税抜10,000円) ②Sサイズ(NR-19) **6,270円**(税抜5,700円)

●裏面マジックテープ付で2つ折りにして脇や足の間に挟んで使用することもできます。
 ●サイズ/①直径約28×厚み4.5cm②直径約20×厚み4.5cm ●重量/①約160g②約85g ●材質/(表面)シープスキン(中材)ウレタン(裏面)ナイロン布地マジックテープ付

①Mサイズ(NR-18) ②Sサイズ(NR-19)

ウイズ

介護保険制度
衣類・肌着
歩行補助用品
車いす
車いす関連用品
ベッド関連用品

床ずれ防止
関連用品

移乗用品
入浴関連用品

排泄・トイレ
おしり用品

住宅安全管理

介護予防
レクリエーション

施設用品
コミュニケーション
防災用品

食事・口腔ケア

自活・自助具

生活・健康用品

078A-01 かかとあて NR-07 1302-0200


- ①2ヶ1組 15,950円(税抜14,500円)
 ②右足用 ③左足用 各7,975円(税抜7,250円)
 ●かかとを優しく包み込み、ムれることなく床ずれを防止します。
 ●サイズ/フリー
 ●重量/約240g(1組)
 ●材質/(表面)シープスキン
 (裏面)ナイロン布地マジックテープ付



ウイズ

078A-02 ひじあて NR-08 1302-0400


- ①2ヶ1組 15,400円(税抜14,000円)
 ②右手用 ③左手用 各7,700円(税抜7,000円)
 ●ひじの床ずれを防止し、関節の痛みを和らげます。
 ●サイズ/フリー
 ●重量/約300g(1組)
 ●材質/(表面)シープスキン
 (裏面)ナイロン布地マジックテープ付

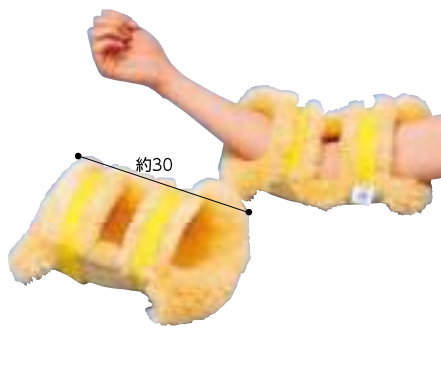

ウイズ

078A-03 楕円パット NR-25 1302-0302

- ①2ヶ1組 10,450円(税抜9,500円)
 ●マジックテープで固定できるのでズレにくく、神経の圧迫をやわらげます。
 ●サイズ/30×20×厚み約4.5cm ●重量/約160g
 ●材質/(表面)シープスキン(中材)ウレタン(裏面)ナイロン布地
 ●付属品/マジックテープ付きベルト2本

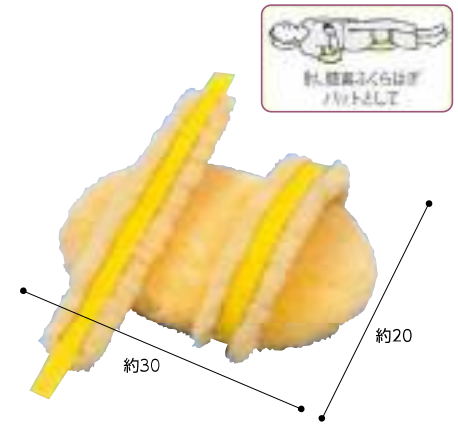

ウイズ

078A-04 万能パットカバー NR-26 1302-0310


- ①2ヶ1組 22,000円(税抜20,000円)
 ●お使いの枕やクッションにマジックテープで固定できるのでズレにくいカバーとして使用できます。
 ●サイズ/30×40×厚み約4.5cm ●重量/約360g
 ●材質/(表面)シープスキン(中材)ウレタン(裏面)ポリエステルレーヨン、布地マジックテープ付



ウイズ

078A-05 NRまくらパット NR-16 1302-0301


- ①2ヶ1組 15,400円(税抜14,000円)
 ●枕や薄型パットとして頭部や患部の床ずれ防止に。術後枕として最適です。
 ●サイズ/25×35×厚み約4.5cm
 ●重量/約190g
 ●材質/(表面)シープスキン
 (中材)ウレタン

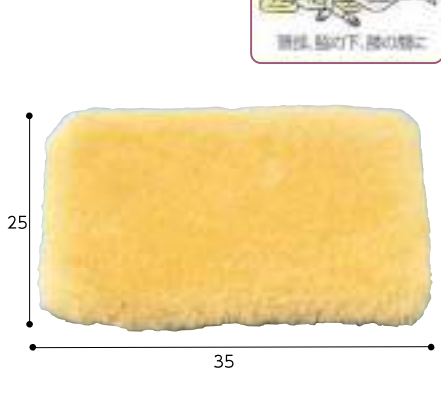

ウイズ

078A-06 三角型ラグ NR-29 1302-0320

- ①2ヶ1組 28,600円(税抜26,000円)
 ●体位変換時に体に触れる面の圧迫を和らげムレを防ぎます。
 ●裏面ファスナー付で中材を取り出し洗濯可。
 ●サイズ/41×21×高さ11cm ●重量/約550g
 ●材質/(表面)シープスキン(中材)ウレタン

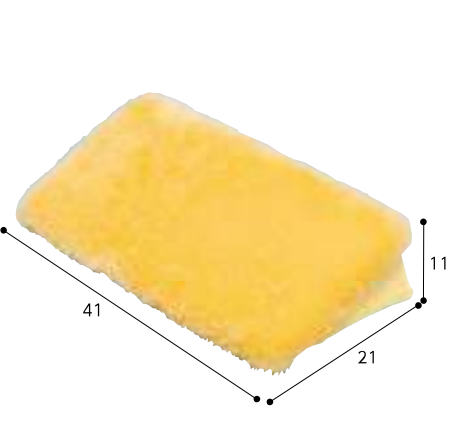

ウイズ

078A-07 NRブーツ NR-17 1302-0210


- ①Sサイズ 33,000円(税抜30,000円)
 ②Mサイズ 35,200円(税抜32,000円)
 ③Lサイズ 37,400円(税抜34,000円)
 ●足を優しく包み込むブーツ。湿潤緩和や車いす利用時の足の保護に。
 ●サイズ/①22~23cm②24~25cm③26~27cm ●重量/①約450g②約600g③約750g(1組) ●材質/シープスキン
 ※規格外のサイズの注文も承ります。



ウイズ

078A-08 NR尖足防止プロテクター NR-13 1302-1400


- ①2ヶ1組 42,900円(税抜39,000円)
 ②片足用 21,450円(税抜19,500円)
 ●内部にプレートが入っており足首関節が硬直する尖足を防止します。ふくらはぎ・かかとの床ずれ防止にも。
 ●サイズ/フリー ●重量/約920g(1組) ●材質/(表面)シープスキン(裏面)ナイロン布地(中材)尖足防止L字スチール板、2重構造ウレタンクッション ●付属品/マジックテープ付きベルト2本

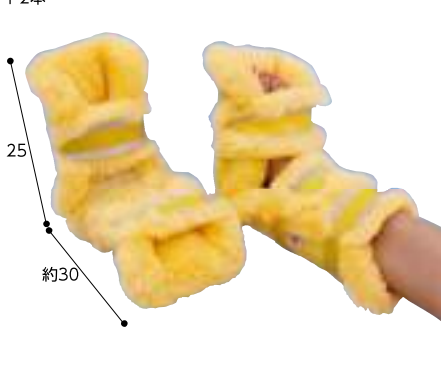

ウイズ

078A-09 NRおむつ用パット NR-15 1302-0900

- 5枚組 10,780円(税抜9,800円)
 ●オムツ内患部の圧迫と湿潤を和らげます。
 ●仙骨部などの肌に直接もしくはガーゼの上から当てます。
 ●サイズ/約10×15cm(1枚サイズ) ●重量/約125g(5枚) ●材質/シープスキン ※汚れた場合は早めに汚れを洗い流して下さい。※バラ販売も承ります。

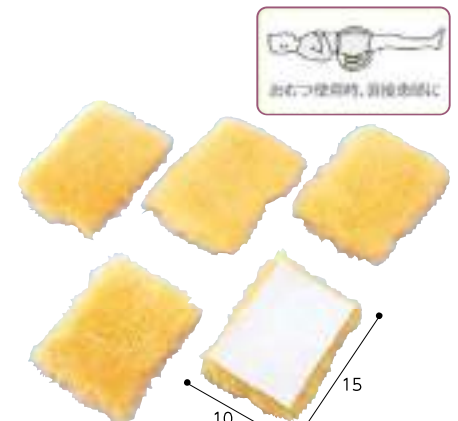

ウイズ

エアマット

079A-01 マイクロクライメイトネクスアイビー 2401-0900

①84cm幅レギュラー ②90cm幅レギュラー ③84cm幅ショート ④90cm幅ショート 各**209,000円**(税抜190,000円)
⑤100cm幅レギュラー **231,000円**(税抜210,000円)

- 床ずれ防止の新技术「マイクロクライメイト対応システム」を搭載。
 - 傾斜型2層エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。
 - 背上げの角度や経過時間を表示するので円滑な看護・介護ケアができます。
- 進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの看護・介護ケアに役立つ機能を搭載。



079A-02 ビリーブ 7502-1310

①MBLV83 83cm幅レギュラー ②MBLV91 91cm幅レギュラー
③MBLV83S 83cm幅ショート ④MBLV91S 91cm幅ショート 各**193,600円**(税抜176,000円)

- 利用者の寝返りの頻度を判定し、床ずれ防止で最も重要な圧対策を自動で行います。
 - 操作ボタン無し、電源入れたら後はビリーブにおまかせください。
 - 制菌加工された完全防水のカバー
- 寝返りの頻度を感じ取り、最適な圧対策に導く自動フィッティングマットレス。



079A-03 オスカー(ハイブリッドタイプ) 7502-2000

①83cm幅 ②91cm幅 ③83cm幅ショート ④91cm幅ショート 各**234,740円**(税抜213,400円)

- 体圧分散式マットレスに求められる重要な9つの特性(体圧分散性能・除圧性能・ずり力対策・寝心地・座位安定性・むれ対策・ひえ対策・体位変換・安全衛生対策)を備えています。
 - 重量/①12kg②13.5kg③11.5kg④13kg ●耐荷重/150kg ●材質/マット=ウレタンフィルム・高耐久ウレタンフォーム、インナー保護フィルム=ウレタン、カバー=ウレタン合皮(制菌加工)
□①MOSC83 ②MOSC91 ③MOSC83S ④MOSC91S
- さまざまな身体状況の利用者様に対応。



079A-04 エアードクター 2401-0100

①84cm幅 ②90cm幅 各**121,000円**(税抜110,000円)

- 簡単な操作で最適な床ずれ防止環境をつくる圧力センサーによる内圧自動制御システム。
 - 居住空間を意識した薄型設計でフットボードにかけやすいポンプフック仕様。
 - 重量/①3.3kg、②3.4kg
 - 材質/エアセル=ポリウレタンフィルム表面シボ加工
□①CR-238 ②CR-268
- 床ずれ防止エアーマットのベーシックタイプ。



079A-05 スモールチェンジラグーナ 2401-2400

①84cm幅レギュラー ②90cm幅レギュラー ③84cm幅ショート ④90cm幅ショート 各**228,000円**(税抜210,000円)

- 骨盤を支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行う「スモールチェンジ機能」を搭載。
 - ハイブリッド構造によりマットレス内の熱や湿気を排気。
 - 重量/約8kg ●材質/マット=ポリウレタンフィルム表面シボ加工、ポンプケース=ABS樹脂 ●セット内容/専用マットレス、専用ポンプ
□①CR-700 ②CR-703 ③CR-705 ④CR-707
- 自動で小さな体位変換を頻回に行います。



079A-06 アルファプラ ビオ(背上げセンサー付き) 4108-1000

①83cm幅レギュラー ②91cm幅レギュラー 各**246,400円**(税抜224,000円)

- 超低圧で身体を外力から守る体重フィードバックシステムが常に最適な体圧分散に制御。
 - 重量/①8.3kg②8.6kg
 - 材質/マット=ポリウレタンフォーム、エアセル=ポリウレタンフィルム、カバー=(上面)表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、(下面)ポリエステル
□①MB-BF3R-HG ②MB-BF1R-HG
- 高齢者の身体特徴に合った床ずれ防止機能。



079A-07 こちあお利楽flow(通気タイプ) 6107-0730

①KE-911T 91cm幅レギュラー ②KE-913T 83cm幅レギュラー 各**300,000円**(税抜270,000円)

- 全自動運転「こちあお利楽」がグレードアップ。
 - 小さな体位変換を繰り返す「スモールフロー機能」を搭載。
 - 重量/①8.6kg②8.1kg ●材質/側地=ポリエステル100%、チューブ=塩化ビニール、エアセル=ポリウレタン、カブリング=PC/PBT樹脂、ポンプケース=ABS樹脂
- 圧切替型で最高レベルの体圧分散性を実現。



079A-08 エアマットレス こちあお利楽通気タイプ 6107-0710

①KE-971T 91cm幅レギュラー ②KE-973T 83cm幅レギュラー 各**217,800円**(税抜198,000円)

- 全自動でご利用者様に適した硬さを実現(i-fitting)。
 - 背上げ時にはカバーをすべらせることで、背部などに生ずるズレを軽減します。
 - 重量/①5.8kg②5.4kg ●材質/側地=ポリエステル100%、チューブ=塩化ビニール、エアセル=ポリウレタン、カブリング:PC/PBT樹脂、ポンプケース=ABS樹脂
- 電源コードを差し込むだけで、床ずれ防止機能がスタート。



080A-01 トライセルE 2401-0810

①84cm幅 ②90cm幅 各**154,000円**(税抜140,000円)
 ●背上げ時のエアマットレスのずり落ちを防ぐ、アジャスト付き固定フード。
 ●スリムになった専用ポンプ&安心設計。
 ●サイズ/ポンプ=幅30×奥行8.8×高さ13.2cm ●体重設定範囲/①・②20~90kg ●材質/カバー=ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
 □①CR-330 ②CR-333

ずり落ちないから、療養者様も苦しくなく、シーツの掛け直しの手間も削減。



下のベッドマットレスは別売りです。
 TAIS/①00206-000129②130 ケーブ

080A-02 クイックフィットシーツ 2401-0640

①84cm幅 ②90cm幅 各**5,830円**(税抜5,300円)
 ●ベッドとシーツのズレを最小限に抑えます。
 ●体圧分散マットレスの機能をしっかりキープします。
 革新的な独自形状の体圧分散マットレス専用ベッドシーツ。



ボックスフレア形状だから、ベッドメイキングに必要な時間を短縮
 ●サイズ/幅①84②90×長さ201×厚み18cm
 ●材質/ポリエステル100% ●色/白
 ケーブ

080A-03 ナーセントコンタ 1205-0611

①91cm幅 ②83cm幅 各**118,800円**(税抜108,000円)
 ●3Dフォームで姿勢の安定と体圧分散を両立!
 ●背上げ時の前滑りや横倒れをストップ。食事に最適な座位姿勢を提供します。
 独自のスリット加工で身体各部の沈み込みを調整。上下肢を支えて効果的な体圧分散を実現。




●サイズ/幅①91②83×長さ190×厚み15cm
 ●材質/中材=ウレタン複合材、側地=ポリウレタン、内カバー=ポリエステル100%
 TAIS/①00149-000061 ②060 アイ・ソネックス

080A-04 ハッピー そよかせ 6113-0100

①83cm幅 ②91cm幅 各**66,000円**(税抜60,000円)
 ●布団やマットレスの上に敷いて使います。沈み込みが少ない高反発マットレスですので身体の動きを妨げず床ずれの予防に。
 ●通気性が高く、ご家庭の風呂場で洗え、中材に抗菌加工を施しているので清潔です。


通気性と高反発の、洗えるマットレス。

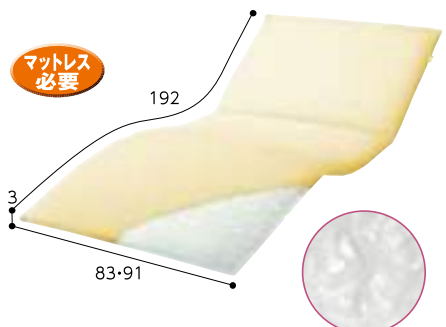

●重量/①3.6kg②3.9kg
 ●材質/中材=合成繊維(ポリエステル系繊維)カバー=ポリエステル100%
 TAIS/(91cm幅)00747-000006 ハッピーおがわ

080A-05 エバープラウド(通気タイプ) 6107-0540

①KE-623TQ 83cm幅 ②KE-621TQ 91cm幅 各**167,200円**(税抜152,000円)
 ●弾力性の異なる5層のウレタンフォームが、優れた体圧分散性を実現。両面の硬さが違うので、お体の状態に合わせてマットレスの硬さを調整することが出来ます。

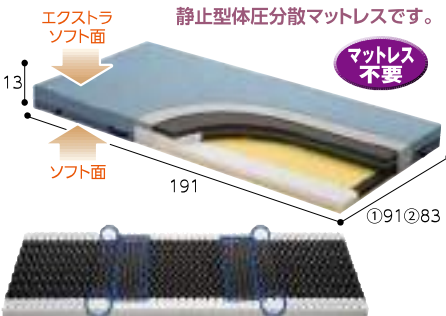

カーブフィットラインが、背上げに伴う圧迫感と姿勢の崩れを抑えます。
 ●重量/①9kg②10kg
 TAIS/①00170-000964 ②962 パラマウントヘッド

080A-06 アルファプラL 4108-0900

①撥水・防水カバー=83cm幅 ②撥水・防水カバー=91cm幅 ③通気カバー=83cm幅 ④通気カバー=91cm幅 各**106,700円**(税抜97,000円)
 ●療養者の能力や要望をサポートする体圧分散と動きやすさの絶妙なバランスが特徴です。
 床ずれ軽度リスク向けのマットレス。



●重量/83cm幅=6.9kg、91cm幅=7.6kg ●材質/カバー①・②=表地(ポリエステル)・裏地(ポリウレタン)、③・④=ポリエステル、中材=ポリウレタンフォーム・シリコンゲル
 □①MB-LW3R ②MB-LW1R ③MB-LA3R ④MB-LA1R
 TAIS/①00563-000101 ②103 ③091 ④093 タイカ

080A-07 アルファプラFII 撥水・防水カバータイプ 4108-1100

①MB-FIIW3R ②MB-FIIW3S ③MB-FIIW1R ④MB-FIIW1S 各**169,400円**(税抜154,000円)
 ●硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転がよりしやすくなっています。



●重量/①83cm幅レギュラー=8.3kg、②83cm幅ショート=7.8kg、③91cm幅レギュラー=9kg、④91cm幅ショート=8.5kg
 ●材質/カバー①②③④=表地:ポリエステル、裏地:ポリウレタン、中材:ポリウレタンフォーム・シリコンゲル
 TAIS/00563-000126 ①27 ③129 ④130 タイカ

080A-08 床ずれナースパッド 2310-0100

①TN1100T-83 85cm幅 **38,720円**(税抜35,200円)
 ②TN1100T-91 93cm幅 **40,535円**(税抜36,850円)
 ③TN1100T-100 100cm幅 **45,375円**(税抜41,250円)
 ●通気性・クッション性に優れた立体素材フュージョン®を3層構造にした厚み2cmタイプ。背中熱と湿気を逃がし、蒸れを軽減、汗でぐっしょり濡れるのを防ぎます。
 床ずれムレ防止の決定版!



●サイズ/①幅85×奥行190×高さ2cm②幅93×奥行190×高さ2cm③幅100×奥行190×高さ2cm ●重量/①1.8kg②2kg③2.5kg ●材質/ナイロン74%・ポリエステル26%
 TAIS/①00762-000001 ②00762-000010 黒田

080A-09 ベッド用アクションパッド 1112-0300

①#6100 スタンダード **47,300円**(税抜43,000円)
 ②#6600 ミドルサイズ **82,500円**(税抜75,000円)
 ③#6300 ダブルサイズ **95,700円**(税抜87,000円)
 ④#6303 ロングサイズ **106,700円**(税抜97,000円)
 ●世界67ヶ国で50年以上の販売実績。
 ●体が沈み込まず、体動能力を損なわない自立支援型床ずれ防止用具。



●重量/①6.6kg②13kg③18kg④23kg
 ●材質/(本体)アクトンドライポリマー(カバー)ポリエステル
 TAIS/④00428-000004 アクションジャパン

洗:洗濯機OK 脱:脱水機OK 乾:乾燥機OK(耐熱温度)

介護保険制度

衣類・肌着・靴下

歩行補助用品

車いす関連用品

ベッド関連用品

床ずれ防止関連用品

移乗用品

入浴関連用品

排泄・トイレ・おむつ用品

住宅・安全管理

介護予防・レクリエーション

施設用品・防災用品

食事・口腔ケア

自活・自助具

生活・健康用品


体位変換クッション

081A-01 体位変換パット「ピタゴラス」 6301-8040


7,480円(税抜6,800円)

- 奥行30cmのウレタンフォームが背中全体を支え、身体をしっかりと保持します。
- 座位保持用として車いす、足上げ(むくみ防止)・背当てクッションとしても利用できます。

30°側臥位のポジショニングをサポートする体位変換クッション。

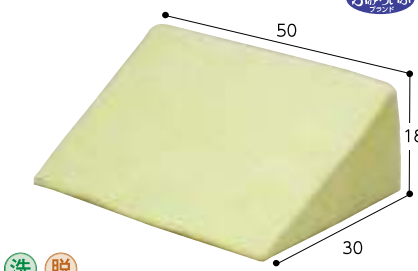

洗 脱

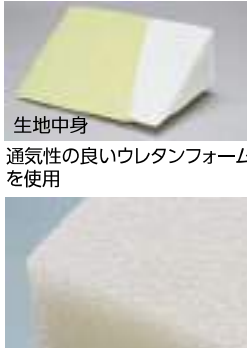

生地中身
通気性の良いウレタンフォームを使用

● 素材/中材=ウレタンフォーム、外カバー=パイル(綿70%・ポリエステル30%)、中カバー=ポリエステル

ウイズ


081A-02 三角クッション・ピタゴラス(30・60・80) 6301-8050

ピタゴラス30 6,930円(税抜6,300円)
ピタゴラス60 9,130円(税抜8,300円)
ピタゴラス80 10,450円(税抜9,500円)

● 材質/中材=ウレタンフォーム、外カバー=パイル(綿70%・ポリエステル30%)、中カバー=ポリエステル

- 通気性の良いスポンジのようなクッション。
- ムレの心配がありません。

体位変換がラクな30度側臥位を保持します。

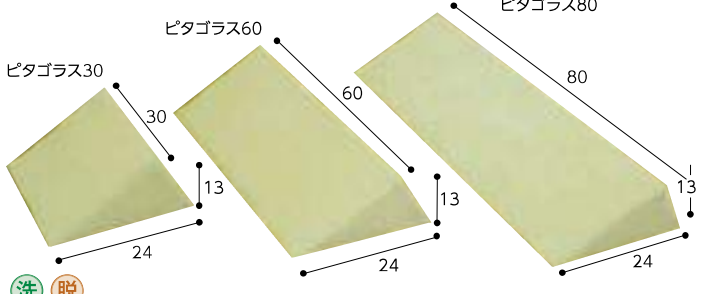

洗 脱

ウイズ

081A-03 エニモ 2401-1440

①CK-461(600タイプ) 10,780円(税抜9,800円)
②CK-462(800タイプ) 12,980円(税抜11,800円)

- 背中を乗せるだけでクッションが傾いて、きれいに角度がつく「スリット構造」。背中に差し込むだけで、サクッと角度がつく構造で、どなたでも簡単にお使いいただけます。



洗 脱


● 重量/①約750g②約950g
● 材質/(中材)ポリウレタンフォーム100%、(カバー)ポリエステル80%・綿20%

TAIS/①00206-000146②00206-000147

081A-04 ポジショニングエアー 6222-0100

8,910円(税抜8,100円)

- ムレない、洗える、衛生的な体位変換クッション。
- 独自の反発性で体の重みを受け止めます。
- 抜群の通気性でサラッと感が持続します。

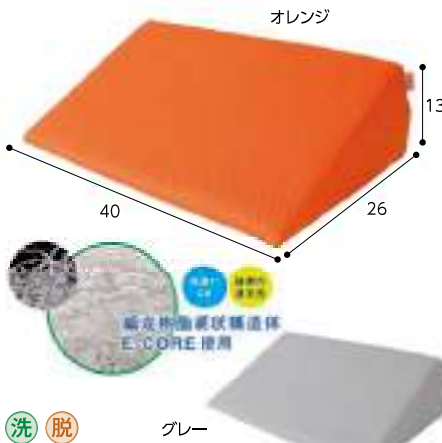

洗 脱


● 重量/360g
● 材質/(中材)ポリエチレン(E-CORE)、(カバー)ポリエステル

TAIS/01250-000004

081A-05 ジェルトロン 体位変換クッション 3224-0100

①標準・高通気カバー仕様 GTC-TH 8,500円(税抜7,727円)
②標準・防水・清拭カバー仕様 GTC-THB 8,500円(税抜7,727円)
③ロング・高通気カバー仕様 GTC-THL 17,000円(税抜15,455円)
④ロング・防水・清拭カバー仕様 GTC-THLB 17,000円(税抜15,455円)

- 体位変換サポート、接触部分の除圧・ずれ吸収・更に通気性も確保
- 使用頻度の高い面にジェルトロンを使用し、垂直荷重だけでなくずれを吸収。

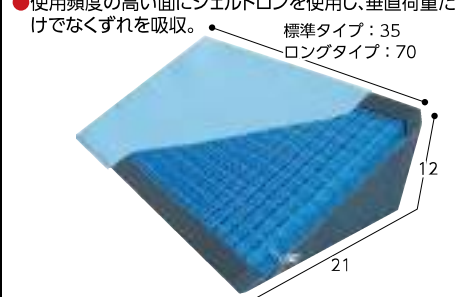

● 重量/①②標準:600g、③④ロング:1,200g ● 材質/(本体)ジェルトロン・高通気フォーム、(カバー)高通気カバー:表面ポリエステル90%・綿10%、底面ポリエステル100%、防水・清拭カバー:ポリエステル100%・ポリウレタンフィルム

TAIS/①②00839-000013、③④00839-000028

パシフィックウエーブ

081A-06 ナーセントパットA(通気タイプ・防水タイプ) 1205-0100

①ナーセントパットA 3点セット(大ピース×1、小ピース2個セット) 31,460円(税抜28,600円)
②ナーセントパットA 2点セット(小ピース2個セット) 19,972円(税抜14,520円)

- 型くずれしにくい三角形の高密度特殊ウレタンクッション。
- ※①②は通気カバーか防水カバーかご指定下さい。

ナーセントクッションなら組み合わせ自由自在、多様なシーンにお使いいただけます。



①② 30°の側臥位に
● サイズ/(大ピース)幅40×奥行40×高さ10cm・(小ピース)幅40×奥行20×高さ10cm
● 材質/[中材]ウレタン、[通気カバー]ポリエステル、[防水カバー]表面ポリエステル100%、(裏面)ウレタンフィルム(ラミネート加工)、(内カバー)綿100%

洗:洗濯機OK 脱:脱水機OK

081A-07 ナーセントメディカルパット(防水カバー) 1205-1400

③ナーセントメディカルパット20 5,203円(税抜4,730円)
④ナーセントメディカルパット40 8,228円(税抜7,480円)
⑤ナーセントメディカルパット70 13,310円(税抜12,100円)

- 本体、カバー共に100℃の熱湯消毒ができるので感染症など万一の時も安心です。
- カバーは本体から外して乾燥機の使用も可能です。



● サイズ/③幅22×奥行20×高さ12.3cm、④幅22×奥行40×高さ12.3cm、⑤幅22×奥行70×高さ12.3cm ● 材質/○カバー/(表面)ポリエステル100%、(裏面)ウレタンフィルム(ラミネート加工)、(内カバー)ポリエステル100%、クッション材/低反発性特殊ウレタンフォーム (裏面)ウレタンフィルム(ラミネート加工)、(内カバー)ポリエステル100%

洗 脱

アイソネックス

介護保険制度

衣類・肌着・靴下

歩行補助用品

車いす・車いす関連用品

ベッド関連用品

床ずれ防止関連用品

移乗用品

入浴関連用品

排泄・トイレ

住宅・安全管理

介護予防・レクリエーション

施設用品・防災用品

食事・口腔ケア

自活・自励


生活・健康用品

082A-01 エアークッション(タオル地カバー付) 1102-0100

万能(タオル地カバー付・ポンプ付) **9,790円**(税抜8,900円) 角座(タオル地カバー付) **5,170円**(税抜4,700円)

クッションにあいている穴の部分で体圧を分散。100kgの体重でも使用OK。

●ただで体位変換のときの支えにもなります。

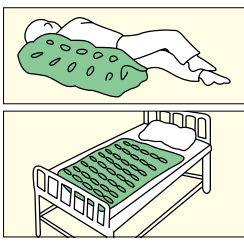

※クッションのみの販売もいたします。
万能 **5,390円**(税込)、角座 **2,420円**(税込)

●サイズ/万能=約60×90×7cm、角座=約48×48×7cm ●耐荷重/100kg ウィズ

082A-03 エアークッション「タフ」(タオル地カバー付) 6301-7500

40穴タイプ(タオル地カバー付・ポンプ付) **9,790円**(税抜8,900円)

16穴タイプ(タオル地カバー付) **5,170円**(税抜4,700円)

●タオル地カバーを使用しているため、爽やかな乾いた肌を保ちます。
●クッションの本体に穴があいているので空気の流れが良く、床ズレの予防に効果的です。

吸汗性と耐久性に優れたエアークッション。吸水性のよいカバー付。



16穴タイプ



●交換クッション/
40穴タイプ=**5,390円**(税込)
(クッションのみ)
●交換タオル地カバー/
40穴タイプ=**4,400円**(税込)
16穴タイプ=**2,750円**(税込)

●サイズ/40穴タイプ=約幅60×長さ90×高さ5~6cm、16穴タイプ=約48×48×高さ5~6cm
●材質/クッション=塩化ビニール
カバー=綿100%
●耐荷重/100kg

TALS/(タフ40)00076-000102 (タフ16)103

082A-06 ヴィスコフロート円座クッション 5219-0200

14,300円(税抜13,000円)

●モールド型低反発の高品質クッション。制菌加工カバーで清潔を保ちます。



ネイビーブルー

●サイズ/幅38×奥行38×高さ5.8cm(内径10cm) ●材質/カバー=ポリエステル100%(制菌・超撥水加工)、中材=モールド型低反発ウレタンフォーム
●色/ネイビーブルー・ベージュ

マルゼン

082A-08 NR 角座カルファクッション 1302-1500

NR-43 薄型穴あり NR-44 薄型穴無 **各22,000円**(税抜20,000円)

●表面のシープスキンは湿潤緩和、体圧分散、摩擦軽減に優れています。
●通気性、耐久性、クッション性が向上。従来のNR-30角座クッション(中材がウレタン)も継続販売。座り心地はご利用者のお好みです!



薄型穴あり NR-43

薄型穴無 NR-44

3次元ファイバースプリング構造体「カルファイバー」を使用

●サイズ/40×40×約7cm ●重量/約630g ●材質/表面=シープスキン、中材=ポリプロピレン立体構造体、裏面=すべり止め布地

TALS/(NR-43)00076-000112 (NR-44)00076-000113

ウィズ

082A-02 低反発リバーシブル足らくクッション 3110-0940

2,178円(税抜1,980円)

●2種類のウレタン素材が腰やお尻にかかる体重をしっかり受け止めます。お尻をスポッリ包み込んであぐらがラクラク。

NEW



ブラウン ネイビー

●サイズ/幅40×奥行32×厚さ10.5cm ●重量/約690g
●材質/本体=ポリエステル100%、中材=ポリウレタン樹脂 ●色/ネイビー、ブラウン

082A-04 デラックス円座 1503-0205

1030 **4,180円**(税抜3,800円)

ソフトな弾力性を持つ特殊ファイバーを使用したクッション。

●中身は患部の保護に適したソフトな弾力性を持つ特殊ファイバーを使用。

●側地は吸汗性の高いパイル生地を使用。

●サイズ/内径約10cm ●重量/375g ●材質/側地=パイル(綿85%・ポリエステル15%)、裏地=ブロード(綿35%・ポリエステル65%) ●色/ブルー・クリーム



ブルー

厚み8

クリーム

中空ポリエステルファイバー

洗 脱 乾 60°C

大阪エンゼル

082A-05 デラックス角座 1503-0200

1032 **4,730円**(税抜4,300円)

丸洗いでき、乾燥機も使用できる便利な角座です。

●裏面にはすべり止め素材を使用していますので車いすにも適しています。

●サイズ/厚さ8cm(内径10cm)

●材質/中材=中空ポリエステルファイバー

側地=パイル(綿85%、ポリエステル15%)

裏地=ポリエステル100%

●重量/410g



洗 脱 乾 60°C

38

大阪エンゼル

082A-07 ヴィスコフロート低反発ウェーブクッション 5219-0300

15,180円(税抜13,800円)

より安定した座位保持の実現と軽減のため作られたクッション。カバーは超撥水生地の制菌加工です。



ネイビーブルー

ベージュ

●サイズ/幅40×奥行40×高さ4~7cm
●材質/カバー=表面:ポリエステル100%(制菌・超撥水加工)、底面:ナイロン、又はポリエステル(すべり止め加工)中材=モールド型低反発ウレタンフォーム
●色/ネイビーブルー・ベージュ

マルゼン


082A-09 勝野式 座るだけで骨盤キュッとクッション 7405-0500

4,180円(税抜3,800円)

骨盤周りを引き締め骨盤補整。

●低反発と高反発と硬質ウレタンの立体3層構造なので、長時間座っていても疲れにくい。裏面にはすべり止め加工付。

●サイズ/幅42×長さ31×高さ8.5cm ●材質/中材=ポリウレタンフォーム、カバー=(パイル地)綿80%、ポリエステル20%(編地)ポリエステル100%
●色/ブルー・レッド

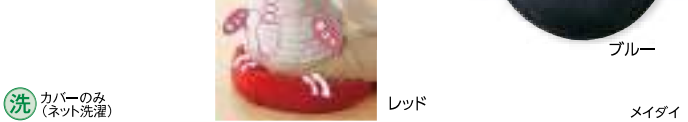

洗 カバーのみ(ネット洗濯)

レッド

ブルー

メイダイ

体位変換クッション/手指硬縮予防具

083A-01 ロンボ ポジショニング ピロー&クッション

2401-1500

- ①RF1 **5,500円**(税抜5,000円)
- ②RF3 **6,050円**(税抜5,500円)
- ③RF5 **14,300円**(税抜13,000円)
- ④RM1-H **15,950円**(税抜14,500円)
- ⑤RM2-H **15,950円**(税抜14,500円)
- ⑥スネークミニ **17,600円**(税抜16,000円)
- ⑦スネーク **27,500円**(税抜25,000円)

豊富な形とサイズのピロー&クッションにより、床ずれ・拘縮等合併症の防止対策に活用できます。

①RF1 (40×60cm)
枕としてやささまざまな部位のサポートに。



高さの補助

②RF3 (23×40cm)
高さの補助としても使えます。



手先の
ポジショニング

③RF5 (80×80cm)
サポートの難しい円背と拘縮にも対応。



拘縮の下肢の
サポート

④RM1-H (クッション本体:65×75cm)
ハンドル部:4×12cm
丸めたり、折り曲げたり自在に使えます。



側臥位の下肢の
サポート

⑤RM2-H (クッション本体:40×80cm)
フラップ部:20×80cm
ハンドル部:4×12cm
快適に30度側臥位をサポート。



30度側臥位
のサポート

⑥スネークミニクッション(φ20×100cm)
さまざまな部位のサポートに。



座位での
上肢の
サポート

⑦スネーククッション(φ20×220cm)
1本のクッションで側臥位や様々な姿勢をサポート。



TAIS/①00245-000193 ②195 ③197 ④232 ⑤233 ⑥152

洗 脱 乾 100℃

■ ケーブ

083A-02 超通気サーティパット

1208-0300

- DSC111-400 **8,360円**(税抜7,600円)
- DSC111-600 **11,110円**(税抜10,100円)
- DSC111-800 **13,970円**(税抜12,700円)

- 30度の角度が楽な体位を保ちます。
- 洗濯可能。

適度なクッション性と、
優れた通気性で
ムレの心配がありません。



TAIS/(DSC111-400-800)00357-000002 (DSC111-600)28

洗 脱

イノアックリビング

083A-03 ハンドサポーター NR-22

1302-0800

3,630円(税抜3,300円)

- 手の平の床ずれ防止用具。手の平の汗や湿気を吸い、ただれなどを防止、緩和します。
- 材質/中材=特殊ウレタンフォーム、外カバー=綿70%・ポリエステル30%、中カバー=ポリエステル100%



約13cm
約8cm

洗

ウイズ

083A-04 癒しの触感クッション

7812-1120

2,090円(税抜1,900円)

- 握る動作で脳の活性に!拘縮予防にも使えます。洗濯可能なカバー付。
- サイズ/約幅15×奥行6×高さ9cm ●材質/(中材)パウダービーズ®(発泡ポリスチレン)、(カバー=本体即地)ナイロン85%、ポリウレタン15% ●色/赤・青



洗 (ネット)

MOGU

083A-05 ミラクルグリップ40S・60・200

6503-0110

- ①MG40S (2個セット) **6,050円**(税抜5,500円)
- ②MG60 **5,016円**(税抜4,560円)
- ③MG200 **8,976円**(税抜8,160円)

- 24Hリハビリ運動は、手指を緩め臭気も軽減。世界初。
- 材質/カバー=ポリエステル100%、中材=ポリエチレン100%

拘縮対策特許取得!!握っているだけで24Hのリハビリ運動。




②直径6×20cm
③17×17×5cm
ホワイトサンズ

洗 脱 ①直径4×12cm

083A-06 通気ビーズスティック

1503-2610

- 1073 各 **1,320円**(税抜1,200円)
- 指や手の硬直予防と、指の間や手のひらの臭いといった改善に。
- 通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。
- 材質/中材=通気ビーズ、側地=ポリエステル鹿の子 ●重量/A約15g、B約30g、C約45g

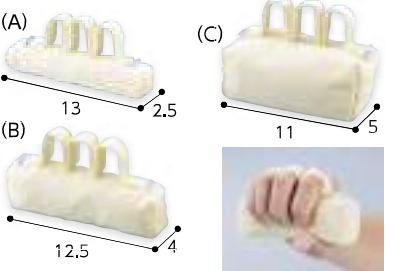

(A) 13 2.5
(B) 12.5 4
(C) 11 5

洗 脱 乾 80℃ 15分以内

大阪エンゼル

083A-07 ビーズプチハンド

4102-4910

880円(税抜800円)

- 指の間にもビーズがある為、指と指の間のただれを予防。
- 手のひらを爪による傷から保護。
- 手指の圧迫を和らげムレをおさえます。
- サイズ/12×13cm ●材質/中材=発泡ポリスチレンビーズ、生地=綿75%・ポリエステル25% ●洗濯(手洗い○)、乾燥機×




ピジョンタヒラ

083A-08 通気ビーズパッド(ベルト付)1612

1503-2500

- S **2,310円**(税抜2,100円)
- M **2,640円**(税抜2,400円)
- L **2,970円**(税抜2,700円)

- 材質/側地=パイル(ポリエステル)、中材=通気ビーズ



かさかや肘に固定できます。

(S) 長さ45×太さ4cm
(L) 長さ65×太さ5.5cm
(M) 長さ55×太さ5cm

洗 脱 乾 80℃ 15分以内

大阪エンゼル

介護保険制度

衣類・肌着・靴下

歩行補助用品

車いす・車いす関連用品

ベッド関連用品

床ずれ防止関連用品

移乗用品

入浴関連用品

排泄・トイレ

住宅・安全管理

介護予防

施設用品

食事・口腔ケア

自活・自助具

生活・健康用品

生活用具で 生活を快適にサポート

オーダーメイド車いす作成・車いす修理・福祉用具レンタル／販売・住宅改修



事業所番号 1370705400

TEL.03-6659-9666

FAX.03-6659-9667

〒130-0026 東京都墨田区両国3-9-6
メール:info@ps-products.co.jp



<https://ps-products.co.jp>

