

お出かけをあきらめていませんか？

段差解消機で

車いすで、いつでも安全で気軽な外出をかなえる環境づくり

押してもらうのは
申し訳ない

スロープを
おすのがつらい・
こわい

単独で仕事に

ちょっと散歩に

外出するのを
控えておこう

ボタン操作だけで
気兼ねなく
快適な外出を

お花見に

買い物に



それぞれの環境に最適な機種選びから、外出環境づくりを私たちがお手伝いいたします。

PS-PRODUCTS

ピーエスプロダクツ株式会社

☎ : 03-6659-9666

URL. <https://ps-products.co.jp>

【 段差解消機リフト 設置場所について】

家屋住環境は様々ありますが、屋外から家屋内へ車いすで入る際に必要な
段差解消機リフト の設置場所としましては、下記のような場所が挙げられます。

①犬走り（ 建物の外周部に設けられたコンクリート 部分）やテラス等に
設置して、掃き出し 窓までの段差解消

②建物や庭に隣接する駐車場に設置して、掃き出し 窓や庭の高さまでの
段差解消

③玄関内に設置して、上がり 框までの段差解消

④階段部分（ 一部改修工事含む場合あり）に設置して、玄関ポーチや
庭の高さまでの段差解消

その他、住宅改修工事の工夫により、リフト 導入の可能性も大きく 広がります。

⑤その他・ 施工設置例

①犬走り（掃き出し窓）への設置例

リフト 導入前



リフト 導入後(下端位置)

リフト 上昇・ 段差解消時



本体設置部＋縁台改修～掃出し窓への段差解消



【ポイント】

アプローチスペースが確保出来ず、本体を家屋側に寄せての設置は困難な環境。

掃出し窓前の柵を撤去、既存犬走り上に縁台を取り付け、その前に必要最低限のコンクリートを打設して本体を設置。縁台上に着脱式の渡し板を取り付けることで、縁台と床面の段差とサッシレールの溝を一度に解消できるよう工夫しています。

②駐車場への設置例

リフト 導入前



リフト 導入後(下端位置)



リフト 上昇・ 段差解消時

③玄関内への設置例

リフト 導入前



リフト 導入後(下端位置)



リフト 上昇・ 段差解消時



④階段部への設置例

リフト 導入前



改修工事(階段一部切り取り)



リフト 導入後(下端位置)



リフト 上昇・ 段差解消時


⑤-1 その他設置例(ウッドデッキ設置)

リフト 導入前



改修工事(ウッドデッキ設置)

リフト 導入後(下端位置)

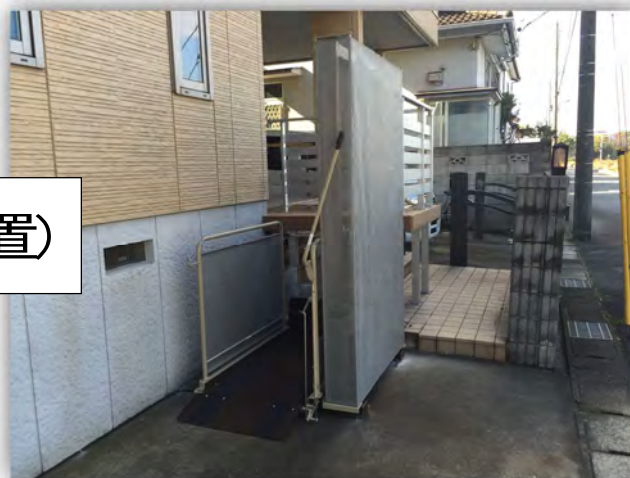

リフト 上昇・ 段差解消時

⑤-2 その他設置例(駐車場内・ コンクリートピット)

リフト 導入前



改修工事(ピット 掘り込み)

リフト 導入後(下端位置)



リフト 上昇・ 段差解消時



車通過可能(専用機種に限る)

I. 段差解消機の種類①

直進専用タイプ



- 本体部以外に広めの整地面積が必要
- 車いすの種類によっては乗れない場合も

- 操作が簡単
- 比較的コンパクトな外形
- 多様な種類から選べる



I. 段差解消機の種類②

3 方向タイプ

- ゆとりのある天板サイズ
- 様々な住環境に適応しやすい
- 2パターンの乗り込み (特定機種のみ)



- 乗り込み操作に慣れが必要
- 本体外形が比較的大きめ
- 背面乗り込み注意 (機種により異なる)



I. 3方向タイプの各乗り込みレイアウト③

～もちあげくん LSS の場合～



機種特徴

- ・ ステンレス天板、着脱可能式ステンレス手すり
- ・ ワイヤレスリモコン
- ・ 耐荷重250kg

3 方向機種 有効天板サイズ及び搭乗定員の違い

- もちあげくん L S S : 有効 D1146×W766 (mm) 定員 2 名
- フラットリフト 3 0 0 J : 有効 D1412×W792 (mm) 定員 2 名
- フラットリフト 2 0 0 J : 有効 D1130×W742 (mm) 定員 1 名
- H E C 9 0 0 : 有効 D1100×W1020 (mm) 定員 2 名
- T D K 1 0 0 S S : 有効 D1200×W803 (mm) 定員 1 名
- アクセスパートナー : 有効 D1165×W901 (mm) 定員 1 名

【参考】

- ・ U D - 3 2 0 L : 有効 D1140×W735 (mm) 定員 1 名

段差解消機



ステップUPチェア

段差解消の最小手段。

必要なスペースは、椅子1台分。段差が30cm程度までなら標準、45cm程度までならロング、が最適です。

■座面高：43.5～73.5cm(標準)/45～85.5cm(ロング) ■座面寸法：幅40×奥行30cm ■電源：AC100V ■本体重量：23kg ■TAISコード：00521-000003



ゼロハイトリフト150

電源不要なのは、これだけ。

LSSのラインナップで、電源不要かつ移動可能な段差解消機はこのゼロハイト150だけ。常設困難な環境でチカラを発揮します。でも、使わないときに片付けておこうと考えているなら、経路にご注意を。

■上限：68cm ■外寸：幅77.2cm×長さ103.1cm(ペダル含む) ■電源：なし(足踏み油圧式) ■最大積載：150kg ■本体重量：45.2kg ■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：不可 ■TAISコード：00247-000017



UD-420

屋内専用。主な守備範囲は玄関です。

段差解消機ではめずらしい、ちょっぴり家具を意識したフォルムです。玄関をはじめとした家屋内で使うために装備をシンプルにして、設置スペースを省く工夫が施されています。

■上限：50cm ■外寸：幅86cm×長さ121cm ■電源：AC100V 100W ■最大積載：120kg ■本体重量：75kg ■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：不可 ■TAISコード：00084-000072



HEC650

65cm級の、正方形バージョン。

解消する段差が65cm弱というのは、日本の段差でもっともポピュラーなサイズ。使用条件によって、正方形が便利の場合と長方形が便利場合があります。LSSのラインナップでは、HEC650はその正方形版と位置づけられています。

■上限：65cm ■外寸：幅107.2×長さ137.5cm ■電源：AC100V 90W ■最大積載：180kg ■本体重量：80kg ■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：不可 ■TAISコード：01114-000001



フラットリフト200J

65cm級の、長方形バージョン。

解消する段差が65cm弱というのは、日本の段差でもっともポピュラーなサイズ。使用条件によって、正方形が便利の場合と長方形が便利場合があります。LSSのラインナップでは、フラットリフト200Jはその長方形版と位置づけられています。

■上限：68cm ■外寸：幅84×長さ113cm(左右曲がり時は幅79.5×長さ168.5cm) ■電源：AC100V 300W ■最大積載：200kg ■本体重量：135kg ■フラップ：オプション ■天板上での車いす回転：可 ■TAISコード：(本体のみ) 00247-000023 (フラップ付) 00247-000025



もちあげくんLSS

70cm級の、長方形バージョン。

多くのケースが65cm程度であるとしても、それを越えるサイズの段差もたくさんあるものです。もちあげくんLSSは、段差解消機としてのクオリティに定評のある「もちあげくん」に別注をかけた特別版です。

■上限：70cm ■外寸：幅82×長さ151.5cm ■電源：AC100V 150W ■最大積載：250kg ■本体重量：150kg
■フラップ：オプション ■天板上での車いす回転：可 ■TAISコード：00017-000008（フラップなし）、00017-000012（フラップ付）



UD-650

数量限定品

名前より、高く上がります。

段差解消機はアルファベットと数字の組合せで商品名が構成されていることが多くてややこしいのですが、非常に似た名前の商品がラインナップされていますが、このUD-650は、最大82cmと高い段差に対応する機種です。

■上限：82cm ■外寸：幅140×長さ154.7cm ■電源：AC100V 150W ■最大積載：180kg ■本体重量：118kg
■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：可 ■TAISコード：00084-000082



アクセスパートナー

70cm級の、正方形バージョン。

65cm級に次いで多い70cm級でも、やはり正方形タイプの商品が適した環境というものがあります。さまざまな設置環境に対応するため、アクセスパートナーはラインナップされています。

■上限：70cm ■外寸：幅111.5×長さ158.5cm ■電源：AC100V 280W ■最大積載：200kg ■本体重量：84kg
■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：可 ■TAISコード：00133-000022



フラットリフト300J

1m級の、長方形バージョン。

LSSのラインナップでも、1m級となるとかなり絞られてきます。フラットリフト300Jは、その長方形バージョンですが、その細長い天板形状は、幅の少ない設置環境で大変効果的な機種となります。

■上限：100cm ■外寸：幅89×長さ198cm(左右曲がり時は幅84.5×長さ202.5cm) ■電源：AC100V 300W ■最大積載：300kg ■本体重量：203kg ■フラップ：オプション ■天板上での車いす回転：可 ■TAISコード：（本体のみ）00247-000024（フラップ付）00247-000026



HEC900

優先したのは、車いすの取り回し。

段差解消機上で車いすを動かすと、意外とスペースが必要です。HEC900はその広めの天板と車いすの形状特性に配慮した設計で、車いす操作の負担感を軽減します。

■上限：90cm ■外寸：幅112.8×長さ169.6cm ■電源：AC100V 90W ■最大積載：180kg ■本体重量：85kg
■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：可 ■TAISコード：01114-000002



TDK100

1m級の、正方形バージョン。

このクラスの段差解消機の中では、設置面積がとてもし少ない機種です。

■上限：106.5cm ■外寸：幅115cm×長さ152.1cm ■電源：AC100V 90W ■最大積載：180kg ■本体重量：165kg
■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：可 ■TAISコード：00447-000007



UD-1500

1mを超えて、二人乗りできます。

1.5m級としては、前モデルとなるUD-800に比べて20%以上スリムになりました。
また、天板を左右両サイドから支持する機構になったことで、安定性も向上しています。

■上限：150cm ■外寸：幅112.5×長さ169cm ■電源：AC100V 200W ■最大積載：200kg 本体重量：168kg
フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：不可 ■TAISコード：00084-000116



UD-800

数量限定品

据え置きタイプの最大到達点。

LSSのラインナップ中でもっとも高い、150cmまで上昇する機種です。その設置する姿は、組立てるというより、建てるという表現がふさわしいかもしれません。

■上限：150cm ■外寸：幅112.8×長さ169.6cm ■電源：AC100V 150W ■最大積載：240kg ■本体重量：215kg
■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：不可 ■TAISコード：00084-000068



UD-800L


数量限定品

UD-800に、L字乗り込みタイプが加わりました。

150cmまで上昇するUD-800に天板上から横方向に出入りできるタイプが加わって、これまで以上に使える環境が広がりました。

■上限：150cm ■外寸：幅123×長さ168.5cm ■電源：AC100V 150W ■最大積載：240kg ■本体重量：219kg
■フラップ：標準装備 ■天板上での車いす回転：可 ■TAISコード：00084-000098

Wheelchair lifts Smart Choice Guide

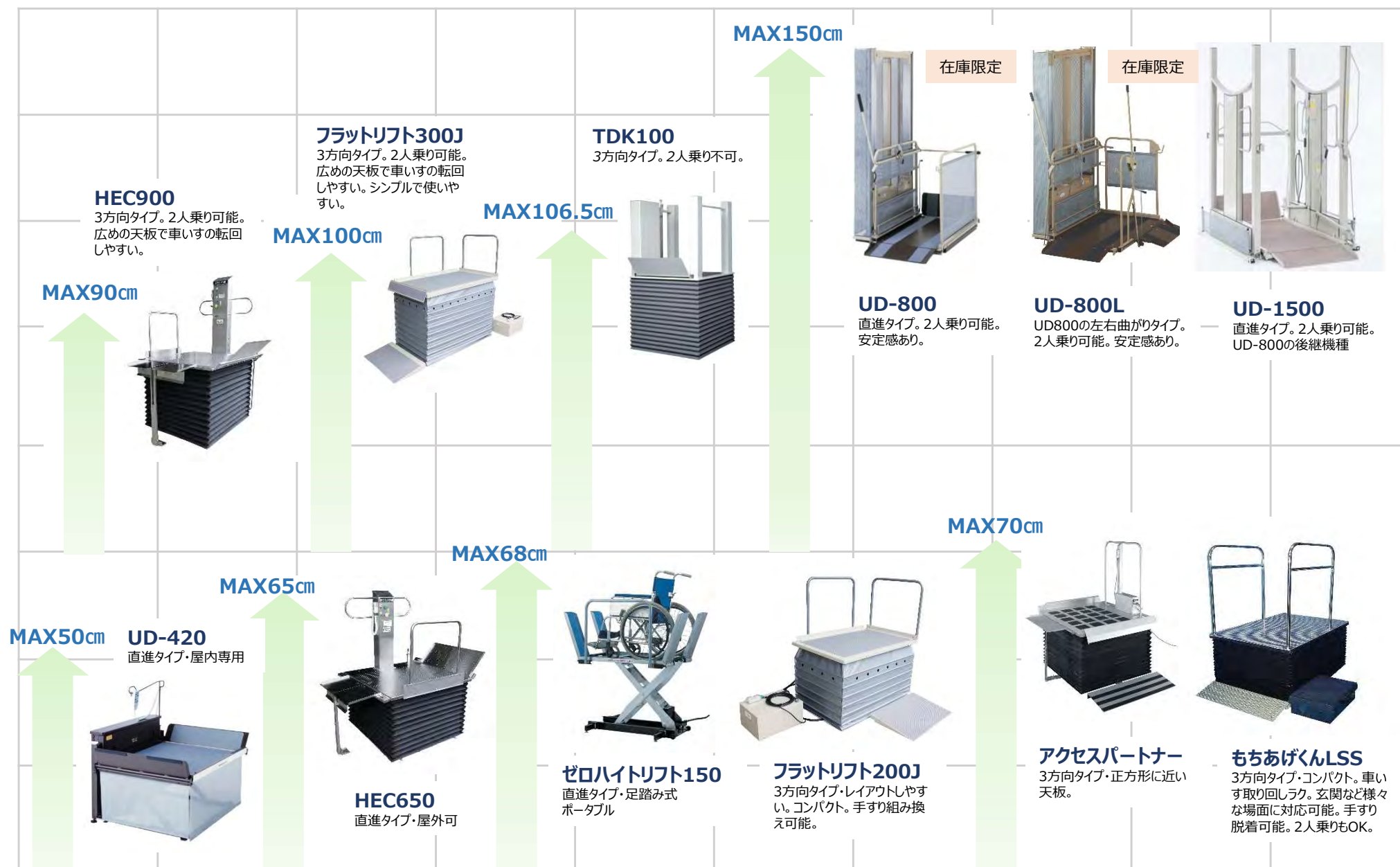

Transfer Lift Smart Choice Guide

Bathroom

(浴室用※)



バスパートナー湯ニット

浴槽内、洗い場、床に安定して移動できます。条件によっては脱衣場との出入りも可能になります。



マイティエース2浴室セット

アーム旋回範囲内での移動を可能にします。ハンガーだけの昇降なので、狭い浴室でも邪魔になりません。



Portable

(床走行タイプ)

バイキングM

いろいろな部屋に移動して使います。複数の対象者がいる施設などに。



つるべーBセット

ベッドの脚側への設置に適しています。安定した動きが安心を生みます。



アーチパートナー

設置場所のスペースによってサイズを選べます。横移動も電動の「電動走行式」も選べます。

「基準となる居室向け据置型リフト」

部屋の出入り口やレイアウトに問題がなければ、最も快適なこのタイプから選びます。設置不可能ならベッドサイドタイプへ。

Robin (ロビン)

誰もが簡単に、快適に移乗できるリフトです。邪魔にながちなハンガーがなく、初めての人も、リフトに慣れた方も驚くほど簡単に使いこなせます。耐荷重200kgとパワフルです。



マイティエース2ベッドセット

ベッドの頭側設置に向いています。ハンガーだけが下りてくるので、アームが邪魔になりません。

bedside

(居室用：ベッド設置タイプ)

Bedroom

(居室用：据置タイプ)



アーチパートナー隅っこ

部屋の中で、車いす、ソファ、食卓などいろいろなところに移ることを可能にします。



IL-200

ベッドのレイアウト、ベッドの機種を選ばない、自立するベッド設置型リフト。ほかの機種の不都合な点を解消した進化形。

※浴室のほかにも、様々な場面で設置できるリフトも対応可

移乗用リフト



IL-200

最大荷重120kg。ベッドも選びません。

ベッドサイドタイプのリフトとしては最大クラスの耐荷重120kgのスペックに加えて、リフト自体が自立するために、セットするベッドの機種を問いません。

■全高：220.5cm（最高） ■電源：AC100V ■耐荷重：120kg ■TAISコード：00084-000118



Robin ロビン

パワフル。ハンガーレス。

LSSのレール式リフトでもっとも大きな耐荷重を誇ります。
また、ラインナップ中唯一ハンガーをもたない構造で、
車いすへの着座時における操作する方の注意点を
ひとつ減らすことができます。

■サイズ：W203cm×D120cm×H195～230cm / W255cm×D120cm×H195～230cm ■電源：充電式 ■耐荷重：200kg ■昇降ストローク：250cm ■TAISコード：00245-000162



マイティエース ベッドセット（ワイヤレスリモコン）

マイティ。無線。

ワイヤレスリモコンを標準装備しています。使用されるベッドへの対応能力も向上しました。お申し込み時に使用されるベッドも合わせてお知らせください。（写真のベッドは付属しません）

■全高：205cm（最高） ■電源：AC100V ■耐荷重：90kg ■TAISコード：00139-000034



つるべー Bセット

つるべー。

つるべーです。Bセット以外も提供可能です。

■全高：205cm(最高) ■電源：AC100V ■耐荷重：100kg ■TAISコード：00229-000005



つるべー Y6セット

つるべー。Y6。

つるべーです。Y6セットは床走行式です。

■サイズ：幅60(閉脚時)×長さ120×高さ199.5(最高時)×ベッド下に入るフレーム高さ6.8cm ■電源：充電式 ■耐荷重：120kg ■本体重量：42kg ■TAISコード：00229-000044



バイキング M

数量限定品

床走行も悪くない。

そう思える程の質感を持った床走行リフトです。床走行リフトは操作する方の動く範囲が大きくなりがちですが、このバイキングは無線リモコンで、リフト昇降時の最適なポジションがどこであってもストレスなく操作できます。

■サイズ：幅69(脚部閉じている時)×長さ123×高さ202(最高時) ■電源：充電式 ■耐荷重：205kg ■本体重量：34kg ■TAISコード：00445-000012




アーチパートナー

抜群のバリエーション。

使用環境のスペースによって、豊富な選択肢が用意されています。極端な場合、ベッド側方に車いす1台分+10cm=およそ70～80cm程度のスペースでも対応可能です。

■種類：6畳用/電動走行6畳用/固定型6畳用/固定型8畳用/固定型10畳用 ■サイズ：幅258(6畳用)×奥行100(固定型93)×高さ220～230cm(6畳用) ■電源：AC100V ■耐荷重：100kg ■TAISコード：(6畳用) 00133-000017、(固定6畳用) 00133-000029、(固定8畳用) 00133-000030、(固定10畳用) 00133-000031、(電動走行6畳用) 00133-000018

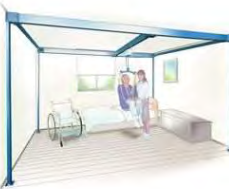

アーチパートナー 隅っこ

2カ所以上移乗したい対象があるとき。隅っこの出番です。

車いすとトイレというように複数の移乗対象がある場合には、お部屋の4隅に支柱をセットしてその範囲をどこにでも移動できる隅っこがお勧めです。

■サイズ：幅350×奥行250×高さ230.5cm ■電源：AC100V ■耐荷重：100kg ■TAISコード：(6畳用) 00133-000019、(8畳用) 00133-000035、(10畳用) 00133-000036



マイティエース 浴室セット

なかなかの自由度。浴室でも。

特に在来工法でつくられた小さめの浴室で、多関節アームによる小さな回転半径が強みを発揮します。

■寸法は現場による(詳細お問合せください) ■電源：AC100V ■耐荷重：90kg ■TAISコード：00139-000014



バスパートナー 湯ニット

設置面積は大きいのに、浴室は広く使える不思議。

湯ニットの基本的なレイアウトは、浴室の4隅に支柱をセットして、それぞれの支柱の接続は天井面で行い、リフト本体は支柱の範囲を自在に移動する構成。つまり浴室内で活動する範囲に干渉しづらくなっているのです。リフトで入浴するひとにも、そうでないひとにも使いやすいデザインです。


■寸法は現場による(詳細お問合せください) ■電源：充電式 ■耐荷重：100kg ■TAISコード：00133-000021

据置型リフト「ロビン」

// Face to Face // の安心感



ハンガーを使用しない2本のストラップ方式で利用者の顔がフリーになり、安心且つスムーズに吊り具の着脱及び上下昇降が可能

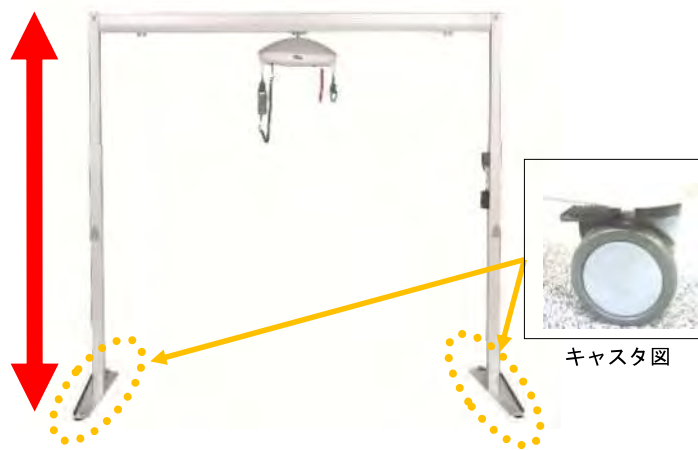

キャスタ付で簡単に設置・移動が可能
高さはワンタッチで6段階調整（195～230 cm）
最大荷重 200 kg

■機能紹介

ハンガー

吊り具の抜け止めがついてい
ますから安心です。

アーム旋回ロック機能

15度間隔でロックできますから、
介助がスムーズに行えます。

手元スイッチ

昇降のためのスイッチです。

吊り具

身体状況や用途に合わせて6種類からお選びいただけます。(詳細は各営業所までお問合せください。)

一般的なタイプ



通気性の良いメッシュタイプ



装着が簡単脚分離タイプ





着脱が簡単セパレートタイプ



■仕様

全長	1,945mm
全幅	1,860mm
全高	1,555 ~ 2,205mm
吊上げ高さ	620 ~ 1,705mm
上昇時間	約 37 秒 (120 kg 負荷時)
下降時間	約 18 秒 (120 kg 負荷時)
重量	75 kg
最大持ち上げ質量	120 kg
主要材質	スチール

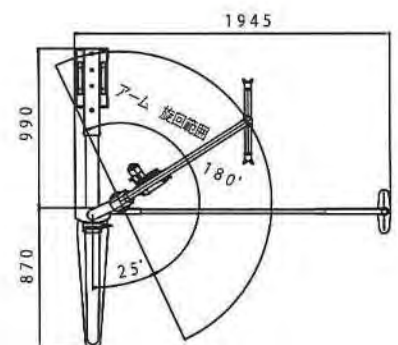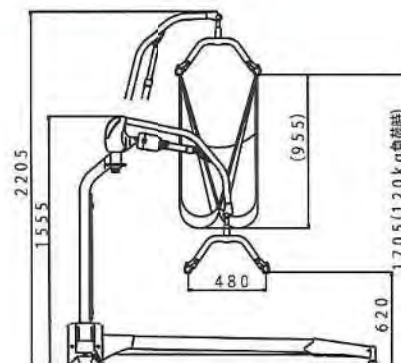

お取り扱い

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。

※価格、仕様は予告なく変更する場合があります。(※詳細は各営業所にお問合せください。)

(2018年3月/第2版)

新商品

ベッドサイド用リフト

IL-200

本体価格

510,000 円 (非課税)

平成30年1月発売

「やさしさ」
かなえる
新発想

福祉
認定
事業者
助成金

介護保険
福祉用具
貸与
対象品

made
in
JAPAN

JAN コード 4543085070231

TAIS コード 00084-000118



安心できる
耐荷重 120 kg

大柄な人でも安心して使用できます。

安全な介助
アーム旋回ロック機能

15度間隔でアームがロックできますから、揺れが抑えられ、介助が安全にスムーズに行えます。

組立・分解が簡単
レンタルに最適

- ・軽自動車(ワンボックスタイプ)に積み込みできます。
- ・一人で約10分で設置できます。
- ・ベッドを持上げる事なく、置くだけで設置でき、腰痛を予防します。

NEWデザイン！初心者にもおすすめのファーストシート

肩から太ももまで身体の多くを包み込むシートで多くの方がご利用可能なユニバーサルタイプのスリングシートです。車いす上でも敷き込み易く、吊り上げ時に圧迫を生じにくい形状で、装着の失敗が少なく安心してご利用いただけるので、初めてリフトを使用される方にもお勧めです。



4 ウェル・ネット研究所の っのこだわり設計

こだわり
01

独自製法※で 優しい肌ざわり

スリングシートのために生地から製造。適度な伸縮性があるのが特徴で、特殊なトリコット製法※を用いた独自の生地編みにより、従来品に比べて非常に柔らかく、利用者にも優しい肌ざわりの良い生地となっています。

こだわり
02

入浴にも最適な生地

水をほとんど含まない繊維を使用し、水抜けと肌触りの良さを考慮した素材をスリング専用素材として生地から製造しています。

こだわり
03

らくらくフィット設計 手順が簡単で スマートに装着

生地表面の摩擦を軽減し敷き込みやすく、臀部の覆いを最小限に抑え装着手順を簡易にしました。初心者にも扱いやすくお勧めします。

こだわり
04

安定した姿勢を保持

敷き込みやすいだけでなく、同時に快適な姿勢保持を探究しました。適度に生地が伸縮することで体にフィットし、骨盤上部にテンションをかけることで座位姿勢が良くなり安定します。姿勢がくずれにくく生地からの圧迫感をなくしました。利用者に負担なく快適な乗り心地を提供できます。



サイズ	SS	S	M	L
身長 (cm)	110～140	120～140	135～165	160～180

※このサイズ表はあくまでも目安です。

SS → WN-4010-SS
S → WN-4010-S
M → WN-4010-M

L → WN-4010-L

価格 **52,000 円**
(税抜価格)

価格 **57,000 円**
(税抜価格)

洗濯は湯温 40℃を限度として非常に弱い水流または手洗いで行ってください。漂白剤、乾燥機、アイロン、ドライ・ウェットクリーニングは使用できません。直射日光は避けて日陰で乾燥してください。※スリングシートを消毒したい場合は弊社指定の消毒液をご使用ください。



耐荷重
120kg

首を自分で支える事が
できる方が対象

製品重量：900g
生地：エコテックスニット
素材：ポリエステル繊維
ポリプロピレン繊維

脚分離タイプ 座った姿勢で前かがみできる方には車いす上で脱着可能です

頭を自分で支えることができる方



背中から太ももまで包み込むシートです。脚部を交差サポートし、座ったままで装着が可能です。メッシュ生地で水抜けが良く、入浴にもご利用できます。

ウェル・ネット 脚分離ローバック

頭を自分で支えることができない方



頭から太ももまで身体全体を包み込むシートです。脚部を交差サポートし、座ったままで装着が可能です。メッシュ生地で水抜けが良く、入浴にもご利用できます。

ウェル・ネット 脚分離ハイバック

座位姿勢が安定している方



脚分離型スリングシートの中で最も装着が簡単なシートです。(当社製品比)身体にかかる圧迫も大幅に軽減されて乗り心地も良く、水はけの良い素材を使用しており、入浴にもご利用可能です。

ウェル・ネット ライトスリング

シートタイプ 車いす上でも敷いたまま使用します

頭を自分で支えることができる方



肩から太ももまで身体全体を包み込むハンモックタイプのシートです。水抜けの良いメッシュ生地を使用しております。

ウェル・ネット シート型ローバック

頭を自分で支えることができない方



頭から太ももまで身体全体を包み込むハンモックタイプのシートです。水抜けの良いメッシュ生地を使用しております。

ウェル・ネット シート型ハイバック

ベッド上でも敷いたままで利用



モリトー パオフル

その他 これ以外にも用途に応じて様々な吊り具がございます

「いす」に乗ったまま入浴可



ミクニ シャワーチェアⅡ

下着の着脱も容易 トイレ利用にも



リフトに乗りながら衣類の着脱が可能なスリングシートです。排泄や入浴介助のご利用に適したスリングシートです。

ウェル・ネット ハイジーン

利用者自身での脱着も可能



胸と足の2本ベルトで身体を支えます。ご利用者自身でスリングを着脱することも可能です。

ウェル・ネット セパレート

移乗リフト

選定のポイント

吊具選定の仕方（簡易版）

①車いす上で取り外しする場合「脚分離スリング」

○座った状態で前傾姿勢をとることができる方はこちらをお使いください

ハイバック：頭を支えた状態で吊り上げ可能なので、寝た状態からの利用・頸部が安定していない方への利用に向いています。

ローバック：頭まで支える部分がないので脱着が比較的しやすいです。ハイバックの条件が必要ない方に向いています。

※**サイズについて**：標準的な体形であればほぼMサイズで適応可能です。不安であれば異なるサイズのサンプル品でお試ください。

②車いす上で取り外す場合「シート型スリング」

○座った状態で前傾姿勢をとることが「できない」方や取り外す必要のない方はこちらをお使いください

ハイバック：脚分離と同様 ローバック：脚分離と同様 ※サイズについて：脚分離と同様

③トイレ（ポータブルトイレ含む）での利用「ハイジーンスリング」

○お尻の部分が大きくあいたまま吊れるのズボンをおろす動作が容易です

④上記以外の場合

○吊具はほかにもたくさんの種類があります。上記以外の場合はご相談ください

経験豊富な私たちが様々な状況に応じた
最適な移乗リフトをご提案します



PS-PRODUCTS

リフト設置事例

設置場所：浴室

リフトの仕様：1本支柱の固定式。関節アームで細やかな動きが可能。

※写真はマイティーエース浴室セット(ミクニ)



ブラケット式（壁固定）



パイプジョイント式（天井裏固定）



安心できる自宅のお風呂で毎日入浴

浴室リフト



ご自宅の浴室で簡単・安心・いつでも入浴

私たちはほぼ毎日自宅のお風呂で入浴しています。「自宅で毎日入浴したい」をかなえる浴室リフト。操作は簡単なのでどなたでも安心して入浴することができます。



通所サービスでの入浴が利用しにくい時期も

いままではデイサービスなどでの入浴をしていたのに、外出を自粛したい時などは入浴する回数も制限されがちです。自宅の浴室に入浴できる環境があれば安心です。

介護保険のレンタルで利用もできて費用面も安心

介護保険の福祉用具レンタルが利用できる方であれば、少ない費用で利用できるのも特徴です。様々な浴室で快適に入浴できるよう最適な環境をプランニングいたします。

経験豊富な私たちが様々な状況に応じた
最適な移乗リフトをご提案します



PS-PRODUCTS

リフト設置事例

設置場所：浴室

リフトの仕様：4本支柱の据置式。4本の支柱内で自在に移動が可能。充電式。
自立しており、浴室の壁・天井に軽く突っ張るだけで改修工事不要。

※写真はアーチパートナー湯ニット(明電興産)



脱衣場までレールが飛び出す、
スライドレール仕様も選べます。
(環境によって取り付けられない場合があります。)



リフト設置事例

設置場所：居室

リフトの仕様：4本支柱の据置式。4本の支柱内で自在に移動が可能。通電式。
自立しているので改修工事は不要。

※支柱オフセットは販売のみとなります。

※写真はアーチパートナー隅っこ(明電興産)



移乗リフト 設置例



浴室に設置 自宅の浴室でリラックスして…



居室に設置 いつでも気兼ねない移乗を…



居室に設置 居室のレイアウト上設置しにくくてもこんな機種で…

移乗リフト

選定のポイント

リフト選定の順序（簡易版）

順序①据え置き型リフト（ロビン・アーチパートナーなど）

ほかの方式より格段に使いやすく導入のしやすさにも優れています。お部屋の採寸をしてご相談ください

順序②ベッド設置型リフト（IL-200・マイティエースⅡベッドセットなど）

①を設置する場所に問題がある（支柱の位置にエアコンや出入り口、クローゼットなどがあるなど）場合はこちらを選定します。レイアウト上ベッドの頭側足側のどちらに設置するのが適しているのかも重要なポイントです。

順序③床走行リフト（マイティライト3、バイキングMなど）

リフト全体を動かすので取り回しなどが住宅では大変難しいです。かなり広いスペースかつ移乗したい場所が複数ある場合などに活用できる場合もあります。

上記以外の場合【浴室・便所・室内の複数個所に移乗など】

この場合はLSSが現地調査し設置まで行います。ご連絡ください。

経験豊富な私たちが様々な状況に応じた
最適な移乗リフトをご提案します



Transfer equipment Smart Choice Guide 移乗用具



お尻を浮かせての移乗

Unique!

こまわりさん J

在庫限定

柔軟性のある方向き。
お尻を浮かせて回転させて移乗させます。

本人も介助者も負担なく、安心できるリフト移乗

More comfortable



リフト移乗

※別紙

ご本人も、介助者もいつでもラクに
気兼ねなく。



立ち上がったの移乗

Standing Posture



マスターベルト

重心移動を促して、起立動作をスムーズにします。ご本人も、介助者も
付けると便利です。



フレックスボード

ベッドからリクライニングタイプの車いすへ、曲がるトランスファーボードと、すべるシートで寝たままの移乗を可能にします。

臥位での移乗・位置修正

Lie down position


座ったままでの移乗

Sitting position



マスターグライドM

座ったまま滑らせて移乗する「トランスファーボード」の進化形です。

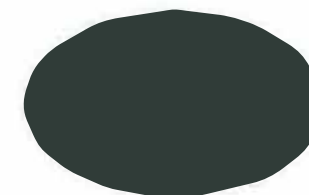

ベディターン

移乗の際に、足の下にしき、向きを変えるのを助ける回転盤です。

必要としている方はたくさんいます

移乗用リフト・用具

「あきらめ」を生む環境で生活を狭めないために

無理をする移乗の環境は
生活を制限してしまっているかもしれません

移乗してもらう
のは申し訳ない

なるべくベッド
に寝ていよう



持ち上げるのは
つらい

腰痛になって
しまった

怖い 痛い

※ そのほかにも、過緊張による拘縮
や、褥瘡、事故によるケガの要因に
もなり得ます。

無理をしない環境が安心した生活
の第一歩です



様々な移乗の為の福祉用具の活用で、二次障害やあ
きらめの心理・双方の身体へのリスクを回避しましょう

私たちは、専門的な見地からご利用者様に最適な移乗環境を提供することに努めていきます!

PS-PRODUCTS

ピーエスプロダクツ株式会社

☎ : 03-6659-9666

URL. <https://ps-products.co.jp>